

Et uunværlig hjelpemiddel i hverdagen!

Trueshade

Mange faktorer spiller inn når du skal ta ut farge. Både humør, årstid, dagsform, pasientens klær, make-up osv. er med på å "bestemme" fargen.

Med Trueshade er du sikret riktig fargevalg og ikke minst alle detaljer i tannen som trengs for å lage en naturtro restaurering.

Trueshade er det eneste LED-lyset som gir øyeblikkelig, korrekt og jevnt daglys (5500K) uansett lyskilde og omgivelse.

Trueshade gir korrekt farge- og karakteristikkjengivelse.

- Høy konstant fargelyskilde
- 5500 Kelvin sørger for optimale lysforhold for nøyaktig fargeuttaking
- Høyeste optisk kvalitet – 2 x forstørrelse BK7 kroneglass linse
- Mobilt utstyr med Li-Ion ladbare batterier og intelligent lader
- Kan enkelt tas med ut til tannlegekontorene



"Veldig fornøyd. Bruker den mye. Gjør arbeidet lettere og gir et perfekt resultat."

Hugo Ellingsen v/Anders

"Superfornøyd"

Aadnevik & Carlsen v/Marianne


Teknikk



- Still inn ønsket intensitet med dimmerhjulet.
- Senk intensiteten for verdi, mikro- og makro-morfologi.
- Juster posisjonen/avstand for ønsket forstørrelse.
- Se på pasientens tenner sammen med shade-guiden.

Unik BK7 linse belagt med kroneglass 0/45°

- 0/45° Geometrisk lys tilpasset med fargemåling eliminerer speilreflekser.
- Korrekt farge- og karakteristikkjengivelse takket være Trueshades konstante fargetemperatur på 5500K.
- Oppfyller belysningsstyrken anbefalt for dental fargevurdering.
- Trueshade har den unike egenskap at lysstyrken kan reduseres for nøyaktig beregning av verdien, og mikro- og makromorfologien, samtidig som den påkrevde fargetemperaturen på 5500K opprettholdes.

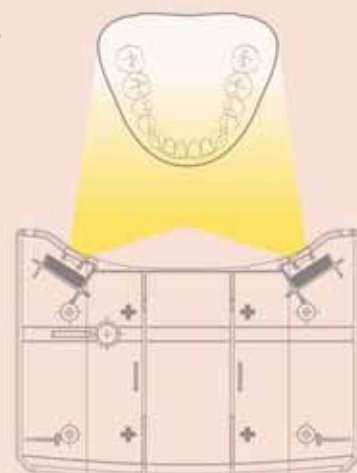

Norsk Orthoform  **Depot as**

Tvetenveien 158 - Postboks 95, NO-0617 Oslo, Norway - Telefon +47 2276 0140
Telefax +47 2226 0230 - bestilling@norskorthoform.no - www.norskorthoform.no

24860 Trueshade ord. kr 9.200,- Kampanje kr 7.800,-