

TIPS & LØSNINGER

1-2017

Godt nytt år!

Vi går inn i et spennende år her i NOD AS. Flere nye produkter som vi gleder oss til å introdusere og vi har planlagt nye kurs og forelesninger med nye og kjente forelesere fra inn- og utland. Vi håper å kunne besøke Norge på kryss og tvers med våre kurs.

Du er hjertelig velkommen til å komme innom oss på en kaffe og en hyggelig prat om du er i Oslo. Vi har en fast utstilling du kan ta en titt på, og her kan du også få demonstrert materialer og teknikker. Fra vårt lager kan du få med deg varene direkte eller vi kan sende.

Mange av våre produkter og materialer er prøvd ut og klinisk testet av rådgivende tannleger i inn- og utland, og sammen med våre innovative samarbeidspartnere er målet å finne materialer og produkter som gjør hverdagen enklere for klinikerne.

I årets første utgave av T&L finner du de nye CASI-instrumentene fra Cosmedent, populært kalt "big time savers". Bisco kommer med "årets" materiale, THERACEM, her kan du forhåndsbestille for å sikre deg rask levering. les også om Biscos unike bonding All-Bond Universal. Benytt deg av kampanjen på White Dental Beauty, som er på vei til å bli et førstevalg på mange klinikker grunnet sin unike kjemi.

På baksiden finner du dato og en kort beskrivelse av noen av våre planlagte kurs. I skrivende stund er det veldig få plasser igjen, så meld deg på!

Med ønske om en riktig god start på det nye året,

Janne Jaffe Hesstvedt
Norsk Orthoform Depot

Gjør din hverdag enklere!

Ryggsmerter kan starte i øynene!

Oakley Radar Micro 250 FLM

Luper påvirker ikke bare øynene, men også ryggen og nakken. Sjansen for at du som tannlege vil få yrkesrelaterte plager er 89 % sikkert. Ved bruk av luper ser du bedre og du sitter ergonomisk riktig. Surgitel er best i test og har fremstilt presisjonsoptikk siden 1932. Deres lange erfaring gir seg uttrykk i markedets beste luper og de er også best i test når det gjelder vekt – kun 20 g.

20042 Surgitel Micro FLM 250
2.5 x forstørrelse

kr 18.900,-



Kampanje!
kr 12.900,-
Spar 6.000,-

” Jeg bare måtte sende deg en melding og fortelle hvor fantastisk glad jeg er i brillene mine! De er helt supre, og jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart meg uten.. ”

Tannlege Carina Urke, Vøyenenga, MNTF

Markedets minste, letteste og beste lys!

Surgitel 3W Micro LED

Veier kun 8 gram. Suveren batterilevetid på hele 8 timer. Kan enkelt monteres på de fleste lupesystemer.

24862 Surgitel 3W Micro LED

kr 12.900,-



Kampanje!
kr 8.900,-
Spar 4.000,-



Gjør din hverdag enklere!

En helt ny teknologi!

All-Bond Universal™

All-Bond Universal brukes på samme måte, uansett prosedyre, direkte eller indirekte. Du trenger ingen ekstra aktivator, som både er en ekstra kostnad og ett ekstra arbeidstrinn.

All-Bond Universal har en Ph på 3,2 som gjør det mer basisk sammenlignet med andre selvetsende og universale bonding systemer. Derfor er også All-Bond Universal kompatibel med ALLE type sementer og kompositter, uansett om de er kjemisk eller lysherdende.

All-Bond Universal inneholder MDP som gir kjemisk binding til Zirkonia samtidig oppnås en enda sterkere binding til dual- og kjemisk herdende resinsementer. MDP er samme monomer som i Z-Prime™ plus (Zirkonia bonding materiale). Ved bruk av All-Bond Universal trenger du ikke en ekstra Zirkonia bonding.

All-Bond Universal er mer hydrofobt etter herding sammenliknet med andre bondingmaterialer, som resulterer i bedre binding og pålitelig bonding, også på sikt. All-Bond Universal er "azeotropic" som sikrer at når etanol er tørket vil det ikke være rester av vann på tannen (vann kommer ikke til å penetrere bondinglaget og påvirke restaureringen).

Viktig å vite er at overskudd av vann forsvinner ikke ved å blåse ut adhesiv, derfor må vanninnhold være lavt (som i All-Bond Universal), og når etanolen har fordampet i All-Bond Universal er alt vann borte. Derfor kan du bruke alle typer resinsementer med All-Bond Universal uten ekstra aktivator.

All-Bond Universal er altså mer hydrofobt og har en høyere pH (3,2) samt lavere vanninnhold sammenlignet med samtlige tilsvarende materialer. Dette gjør All-Bond Universal så unik og kompatibel. All-Bond Universal inneholder IKKE silan da forskning viser at dette ikke vil fungere.

Siden universale adhesiver må lysherdes er filmtykkelse viktig. All-Bond Universal har en filmtykkelse på kun 8 my som gjør at den også anbefales til indirekte prosedyrer. Tilsvarende materialer ligger på 18 my og oppover, noe som gjør det mer risikabelt å bruke på indirekte teknikker.

15478	All-Bond Universal kit 1 x 6 ml + tilbehør	kr 1.367,-
15480	All-Bond Universal Refill	kr 1.160,-



Gjør din hverdag enklere!

Neste generasjon sement

TheraCem

TheraCem er basisk (ikke syreholdig som konvensjonelle selvherdende sementer), og fremmer derfor apatittdannelse og reparasjon av pulpavevet. TheraCem frigjør kalsium og fluor, hindrer bakterievekst, nøytraliserer bakterieproduserte syrer og forebygger sekundær karies. TheraCem har bedre selvherding og sterkere fysiske egenskaper enn noen annen sement på markedet. TheraCem gir høy bindestyrke også til zirkonia. TheraCem er radioopak og ingen etsing eller bonding av tann eller restaurering er nødvendig.

Indikasjoner: Sementering av kroner, broer, inlay/onlay; metall, MK, Porselen, Alumina, Litium Disilikat, Zirkonia og resinbaserte materialer. Kan også brukes til sementering av stifter, implantater, kjeveortopediske braketter og bånd.

11284	TheraCem 1 stk. 8 g, 15 mixing tips & intraoral tips Natural Shade	Kr 1.242,-
-------	--	------------

NYHET!



En ny generasjon tannblekemiddel!

White Dental Beauty NOVON

White Dental Beauty kan vise til 8 års klinisk dokumentasjon og er det eneste blekemiddelet som inneholder det patenterte NOVON. Med Novon halveres tiden det tar å bleke, og behandlingen er både effektiv og skånsom. Innpakning og presentasjon ut mot pasient er også i en klasse for seg. White Dental Beauty leveres i lekre bokser og poser.

White Dental Beauty kan oppbevares i romtemperatur (ikke i kjøleskap), noe som gjør lagringen mye enklere. White Dental Beauty fås 5 %, 10 % og 16 % karbamidperoksid for dag- og nattbleking, slik at du enkelt kan finne den behandlingen som passer din pasient. White Dental Beauty 6 % hydrogenperoksid brukes kun til dagbleking.

18672	10 % White Dental Beauty NOVON, refill 40 x 1,2 ml	kr 2.240,-
18876	10 % White Dental Beauty NOVON, kit 8 x 1,2 ml	kr 529,-



NOVON® er en aktiv, patentert ingrediens i White Dental Beauty blekegelelen – som gjør at den skiller seg fra andre, er raskere, tryggere, mer effektiv og skånsom mot tennene.



Benytt sjansen til å selv prøve White Dental Beauty.
Kjøp 1 pk 10 % White Dental Beauty NOVON refill og FÅ GRATIS
1 pk. White Dental Beauty NOVON 6 %, 4 x 3 ml syringe (tilsvarer 10 x 1,2 ml),
verdi kr 790,-.

Gjør din hverdag enklere!

NYHET!

Alt du trenger til anteriore komposittrestaureringer! Casi instrument

Casi instrument er tidsbesparende og multifunksjonelle instrumenter spesielt utviklet til konturering fasialt. Brukes også til konturering av bukkale flater, approximalflate-oppygging, og gir god kurvatur ved modellering mot gingiva.

UR 2	Casi instrument 3C - Wider blade. Designet til hjørnetenner og sentraler.	kr 699,-
UR 2	Casi instrument 3L - Universal blade. Brukes til å forme alle anteriore restaureringer.	kr 699,-



Gjør din hverdag enklere!

Et "må ha"-produkt

Margin Perfect Matrix


Disse smarte polyester Mylar matriser er et «must» ved komposittrestaureringer iht. Dr. Paul Belvedere som er en av de som står bak matrisesystemet. Classic har en tykkelse på 0,002 og Ultra har en tykkelse på 0,0015. Kurvaturen gjør at de passer subgingivalt og hindrer blod og annen veske fra å komme i kontakt med bonding og kompositt. Forenkler konturering av både kl. III, IV og V restauringer.

24492 Margin Perfect Matrix
100 stk. Classic eller Ultra.

kr 1.032,-

” The versatility and ease of use of the Margin Perfect Matrix in placing direct composite restorations is unmatched. Diastema closures, direct composite veneers and peg shaped lateral build ups can all be done quickly and perfectly with this very simple and effective system. ”

Dr. Sepeideh Gharai, DDS

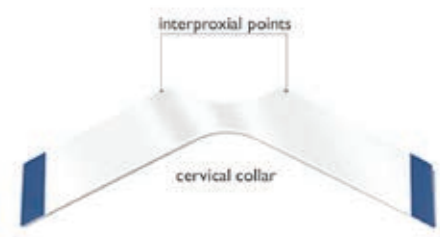

Gjør din hverdag enklere!

Et "må ha"-produkt!

Magic Strip

Magic Strip skaper kontakter enkelt og raskt. Perfekt til bruk ved Accusmile eller andre usynlige tannreguleringer hvor man må pusse litt for at skinnen skal passe. Gir optimal taktilitet og tilgjengelighet selv i de posteriore partier og innsyn og kontroll på hvor stripsen polerer. Bedre enn roterende instrumenter og polererer pga tilgjengelighet. Den fleksible stripsen følger tannens naturlige, konvekse flate. Håndtak gjør det enklere. Autoklaverbar.

24491 Magic Strip Kit
10 Strips + 2 Handles

Kr 1.473,-



Kurs og foredrag 2017

Tannlege **Finn André Hammer** – Vi introdserer "the Golden Standard"

9. februar

Tannlege **Finn André Hammer** – ADVANCED

27. april

Tannlege **Finn André Hammer** – Vi introdserer "the Golden Standard"

1. juni

Dr. **Jason Smithson** – Composite Artistry

16.-17. september

Dr. **Jack Griffin** – Let's Stick Together

Dato ikke fastsatt

Kursene og foredragene holdes i NODs lokaler. Ring oss eller se nettsiden vår for mer informasjon, tider og priser.



Dr. Jason Smithson

BDS (Lond), DipRestDentRCS

Han kalles « one of the best teacher of Composite resin in the world ». Hans CV er lang, og han har mottatt mange priser og utmerkelser.



Tannlege Finn André Hammer

Fredrikstad private Tannlegesenter

Tannlege Hammer har alltid vært opptatt av og hatt en egen interesse for estetisk tannbehandling. Hans kurs er meget praktisk og klinisk rettet med mange gode tips og råd.

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder t.o.m. 28. februar 2017

bestilling@norskorthoform.no

Norsk Orthoform  ETABL. 1930
Depot as

