

## Nordental 2017

Nordental er både en sosial møteplass og stedet hvor nyheter lanseres og kampanjer presenteres. Kom innom vår stand og gjør noen gode «kupp», møt noen av våre kursholdere, få informasjon om våre fremtidige kurs, og få førstehånds kunnskap om nye materialer og teknikker.

Som vanlig har vi våre rådgivende tannleger med oss og flere produktspecialister fra våre fabrikanter.


Gjør din hverdag enklere er tema også for årets utstilling, og du finner mange gode tips i denne Nordental-utgaven av T&L.

Vi i Norsk Orthoform Depot har gjort det til vår oppgave å forstå prosedyrer, teknikker og utfordringer som klinikerne møter hver dag. Med denne kunnskapen har vi i samarbeid med våre fabrikanter funnet produkter som er utviklet til å løse mange av dine kliniske utfordringer.

Har du ikke anledning til å delta på Nordental, ring oss så får du selvfølgelig tilbudene.

Velkommen til en hyggelig prat og handel på vår stand, B01-10.

Vi sees!

  
Janne Jaffe Hesstvedt  
Norsk Orthoform Depot

Gjør din hverdag enklere!



” Jeg bare måtte sende deg en melding og fortelle hvor fantastisk glad jeg er i brillene mine! De er helt supre, og jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart meg uten.. ”  
Tannlege Carina Urke, Vøyenenga, MNTF



Ryggsmerter kan starte i øynene

### Oakley Radar Micro 250 FLM

Luper påvirker ikke bare øynene, men også ryggen og nakken. Sjansen for at du som tannlege vil få yrkesrelaterte plager er 89 % sikkert.

Ved bruk av luper ser du bedre og du sitter ergonomisk riktig. Surgitel er best i test og har fremstilt presisjonsoptikk siden 1932. Deres lange erfaring gir seg uttrykk i markedets beste luper og de er også best i test når det gjelder vekt – kun 20 g.

20042 Surgitel Micro FLM 250  
2.5 x forstørrelse

kr 18.067,-

Messepris!  
13.900,-

Markedets minste, letteste og beste lys!

### Surgitel 3W Micro LED

Veier kun 8 gram. Suveren batterilevetid på hele 8 timer. Kan enkelt monteres på de fleste lusesystemer.

24862 Surgitel 3W Micro LED

kr 11.000,-

Messepris!  
8.900,-



Gjør din hverdag enklere!

Den ENESTE universale Bondingen – unik teknologi!

## All-Bond Universal™

All-Bond Universal brukes på samme måte, uansett prosedyre, direkte eller indirekte. Du trenger ingen ekstra aktivator, som både er en ekstra kostnad og ett ekstra arbeidstrinn.

Ph på 3,2 som gjør den mer basisk sammenlignet med andre selvetsende og universale bonding systemer. Derfor er også All-Bond Universal kompatibel med samtlige sementer og kompositter, uansett om de er kjemisk eller lysherdende.

All-Bond Universal inneholder MDP, som gir kjemisk binding til Zirkonia. Samtidig oppnås en enda sterkere binding til dual- og kjemisk herdende resinsementer. MDP er samme monomer som i Z-Prime™ plus (Zirkonia bonding materiale). Ved bruk av All-Bond Universal trenger du ikke en ekstra Zirkonia bonding.

All-Bond Universal er mer hydrofobt etter herding sammenliknet med andre bondingmaterialer, som resulterer i bedre binding og pålitelig bonding, også på sikt. All-Bond Universal er "azeotropic" som sikrer at når etanol er tørket vil det ikke være rester av vann på tannen (vann kommer ikke til å penetrere bondinglaget og påvirke restaureringen). Viktig å vite er at overskudd av vann ikke forsvinner ved å blåse ut adhesiv, derfor må vanninnhold være lavt (som i All-Bond Universal), og når etanolen har fordampet i All-Bond Universal er alt vann borte. Derfor kan du bruke alle typer resinsementer med All-Bond Universal uten ekstra aktivator.

All-Bond Universal er altså mer hydrofobt og har en høyere pH (3,2) samt lavere vanninnhold sammenlignet med samtlige tilsvarende materialer. Dette gjør All-Bond Universal unik og kompatibel. All-Bond Universal inneholder selvfølgelig ikke silan da forskning viser at dette ikke har noen funksjon.

All-Bond Universal har en filmtykkelse på kun 8 my som gjør at den optimal til indirekte prosedyrer.

15478	All-Bond Universal kit 1 x 6 ml + tilbehør	kr 1.367,-
15480	All-Bond Universal Refill	kr 1.160,-

**Kjøp 3 refill og få med gratis TheraCal (verdi kr 598,-).**



” Jeg har brukt Allbond Universal i flere år og er KJEMPEFORNØYD. ”  
Tannlege Liss Fongaard, MNTF, Oslo

Velkommen til vår stand B01-10!

Gjør din hverdag enklere!

Alt du trenger til sementering!

## eCEMENT™

- Komplet sett med alle komponenter som trengs
- Universalt og allsidig
- Lysherdende sement til anteriore restaureringer.
- Dualherdende sement til posteriore restaureringer.
- Enkelt å fjerne overskudd
- Lav filmtykkelse
- Eksepsjonelle fysiske egenskaper
- Røntgenkontrast

15700	eCEMENT Adhesive Cmentation System Kit 1 Dual-Syringe DC, 1 Syringe LC TRANSLUCENT og Milky Bright, 1 ALL-BOND UNIVERSAL, 1 PORCELAIN PRIMER, 1 PORCELAIN ETCHANT, 1 SELECT HV ETCH.	kr 3.082,-
-------	---	------------



Gjør din hverdag enklere!

## Template Clear

Et avansert resinbasert silikon matrix materiale som forenkler fremstillingen av temporære laminater. Lett å applisere, du unngår interproximalt og gingivalt overskudd.

Template Clear er transparent slik at du kan sette matrixen på plass i munnen og sjekke underskudd og blærer før herding. Herdetid er 90 sekunder.

13947 Template Clear  
6 x 50 ml

kr 1.793,-



To sentraler med diastema behandles med porselens fasetter.



Fyll opp en klar, uperforet skje, med Template Clear.



Plasser skjeen på gips modellen og la det herde (1:30).



Template Clear ferdig trimmet.



Nyhet!

Kom i gang med å behandle «black triangles», diastema og dype klasse III fyllinger.

## Bioclear anterior matrix system

18200 Bioclear anterior matrix system  
Inneholder samtlige Bioclear anteriore matriser, aktive kiler og TruContact-sag.

kr 3.622,-



Nyhet!

Styrke, presisjon, anatomisk kontur og stabilitet

## DUAL-FORCE™

13460 Dualforce complete kit  
Inneholder: 1 x premolar, 1 x molar, 25 x 4,5, 5,5 og 6,5 mm matriser, 20 x lilla, hvite, blå, grønne og sorte active wedges, tang og pinsett

kr 6.399,-



Gjør din hverdag enklere!


Ett poleringsssystem til alt!

## A.S.A.P. Polishers

- Består av 70 % diamantpartikler
- Kan autoklaveres, opptil 30 ganger
- Leveres i 2 størrelser (10 mm & 14 mm)
- Kan brukes på både tørr eller fuktig overflate

14418 A.S.A.P. Starterkit  
12 stk.

kr 1.743,-

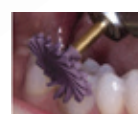


Buccal



Lingual



Interproximal

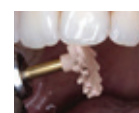

Nyhet!

## Inspire Complete Provisional System

Altfor ofte opplever kliniker problemer med midlertidige restaurasjoner. Lang tid på fremstilling, polering, kantfrakturer og misfarging og tannkjøttproblemer.

Med det nye INSPIRE™ Complete Provisional System, er problemet løst! INSPIRE system kit inneholder kliniske utprøvde produkter fremstilt for å forenkle og løse spesifikke kliniske utfordringer. Resultatet er en enkel og effektiv teknikk som gir deg og din pasient estetisk, funksjonelle og holdbare provisorier som du raskt fremstiller med pasienten i stolen.

- 13949 Inspire Complete Provisional System kit** kr 1.720,- ord. kr 2.210,-  
 4 x Posterior TempTrays, 4 x Anterior TempTrays,  
 1 x 50 ml cartridge Template Ultra Quick Matrix  
 Materials, 1 x 10ml Inspire Esthetic Provisional  
 Composite, 1 x 5 ml Cling<sup>2</sup> Resin Optimized Temporary  
 Cement, mixing tips, laminert instruksjon.



Møt våre produktspesialister og rådgivende tannleger.

Polerbar, fargestabil og slitesterk

## Renamel Microfill

Den eneste kompositten som gir en naturtro emalje over tid. Tannleger over hele verden har Renamel Microfill som sitt førstevalg ved anteriore restaureringer. I mer enn 25 år har denne kompositten vært på markedet uten at kjemien i materialet har vært endret. Lik naturlig emalje kan du polere Renamel Microfill og få optimal høyglans.

- 15505 Renamel Microfill** kr 799,-  
 1 stk. 4 g. A1, A1.5, A2, A2.5, A3, A3.5, A4, A5, A6,  
 B0, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4,  
 LO, LI, MI, DI eller W. Husk å oppgi farge.



Spar tid!

## COUNTERFIT

COUNTERFIT er en unik erstatning til alginat. Den gir deg nøyaktig duplisering til alle teknikker og du slipper å blande selv. Leveres i ampuller til blandemaskiner eller patron til blandepistol. Herdetiden er 2 min. og 30 sek. Du har god arbeidstid, 1 min. og 15 sek. CounterFit er tiksotrop og renner ikke, lett å desinfisere, og stabil. Det betyr at du kan slå opp avtrykket opptil flere ganger om nødvendig.

- 10954 COUNTERFIT automix** kr 1.892,-  
 12 x 50 ml patroner  
**10953 COUNTER-FIT MegaMix** kr 1.138,-  
 380 ml



Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder kun på Nordental

bestilling@norskorthoform.no

Norsk Orthoform  ETABL. 1930  
 Depot as

